



Bedienungsanleitung



**cosiMed Therapie-Knetmasse soft,
85 g, rosa**

Art.Nr.: 21090

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Therapie-Knetmasse

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)



Ihr kompetenter Partner für hochwertige
Physio- und Fitnessgeräte



Produktinformation cosiMed Therapie-Knetmasse

Anwendungen:

Die Hand- und Fingerübungen mit cosiMed Therapie-Knetmassen werden unter Anleitung und Aufsicht des Physiotherapeuten bzw. Ergotherapeuten durchgeführt.

Dieses Training dient der Muskelkräftigung und der Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit.

Vor und nach dem Üben mit Therapie-Knetmassen:

Zum Üben sollen die Hände sauber und trocken sein. Hautpflegemittel sollen erst nach dem Ende der Übungen benutzt werden. Bei Aufnahme größerer Anteile von Feuchtigkeit könnten die Knetmassen klebrig werden und dadurch an den Händen haften. Man kann diese Wasseraufnahme rückgängig machen, indem man die Knetmasse in dünner Schicht auf einer Kunststoffolie auf einer ebenen, waagerechten Unterlage ausbreitet und so über Nacht trocknen läßt. Legen Sie die Knetmassen stets in die Original-Dose zurück.

Bitte achten Sie darauf, daß die Therapie-Knetmassen vor dem Kontakt mit Schmutz und Fremdkörpern geschützt werden. Eine Reinigung verschmutzter Knetmasse ist nicht möglich.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de