



BEIN-UND VENENLAGERUNGSKISSEN

ANLEITUNG

Art.-Nr.  21897 · Kategorie:  Lagerungsmaterial

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

ALLGEMEINES

Das Bein- und Venenlagerungskissen ist Ihr Begleiter für ein bequemes und entspanntes Liegen auf Reisen.

Zusammengefoldet passt es problemlos in jeden Koffer. Das Kissen lässt sich schnell und einfach aufblasen und ermöglicht eine bequeme Position zum Schlafen oder Entspannen.

Passen Sie das Kissen beim Aufpumpen individuell an Ihre Bedürfnisse an und machen Sie es sich bequem.

Das anatomisch geformte aufblasbare Bein- und Venenlagerungskissen bildet die natürliche Beinform nach und ermöglicht somit ein angenehmes Liegen in der Rücken- als auch in der Seitenlage.

LIEFERUMFANG

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
①	Bein- und Venenlagerungskissen aufblasbar	1x

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass eine nicht sachgemäße Benutzung des Kissens zu Verletzungen führen kann.

Achten Sie darauf, das Kissen nicht zu prall aufzublasen, um eine Beschädigung am Produkt zu vermeiden.

Bringen Sie das Kissen nicht in Kontakt mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen, da es sonst zu Beschädigungen am Kissen kommen kann.

KISSEN AUFBLASEN

Das Ventil des Bein- und Venenlagerungskissen funktioniert wie bei einem Wasserball. Ziehen Sie es aus der Vertiefung und öffnen Sie die Schutzkappe. Drücken Sie das nun herausstehende Ventil zusammen und beginnen Sie das Kissen aufzublasen. Lassen Sie das Ventil los, um ein Ausströmen der bereits eingefüllten Luft zu verhindern. Schließen Sie die Schutzkappe sobald Sie das Kissen vollständig aufgeblasen haben und drücken Sie das Ventil zurück in die Vertiefung.

Alternativ können Sie zum Aufblasen auch eine geeignete Luftpumpe verwenden.

Achten Sie darauf, das Kissen nicht zu prall aufzublasen, um eine Beschädigung am Produkt zu vermeiden und ein optimales Liegegefühl zu erzielen.

Sollten Sie das Kissen zu stark aufgeblasen haben, können Sie bei geöffneter Kappe das Ventil zusammendrücken, um Luft abzulassen. Mit einem leichten Druck auf das Kissen können Sie diesen Effekt noch verstärken. So können Sie Ihren idealen Härtegrad finden und einstellen.

LUFT ABLASSEN

Wenn Sie das Kissen verstauen möchten, können Sie praktischerweise die Luft aus dem Kissen lassen und so erheblich Platz sparen.

Holen Sie dazu das Ventil aus der Vertiefung und öffnen Sie die Schutzkappe. Drücken Sie das Ventil etwas zusammen und parallel leicht auf das luftgefüllte Kissen. Üben Sie jedoch keinen zu starken Druck aus, um eine Beschädigung am Produkt zu vermeiden.

Sobald Sie genügend Luft aus dem Kissen gelassen haben, können Sie es so zusammenrollen, dass die verbleibende Luft zum Ventil hin gedrängt wird. Behalten Sie auch hier Geduld und üben Sie keinen zu großen Druck auf das Produkt und Ventil aus.

Sobald das Kissen vollständig entleert ist, können Sie es so zusammenlegen, dass Sie es wieder leicht in der Verpackung verstauen können. Diese soll das Produkt vor Beschädigungen und Verschmutzungen schützen.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Sie können das Kissen theoretisch jederzeit und überall einsetzen, idealerweise auch auf Reisen. Platzieren Sie das Kissen einfach so, dass Sie Ihre Beine bequem darauf legen können. Sie können das Kissen sowohl in der Rücken- als auch Seitenlage verwenden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie das Kissen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Bein- und Venenlagerungskissen aufblasbar, LxBxH 70x50x19/7 cm, weiß
Art.-Nr.	21897
Farbe	weiß
Max. Belastbarkeit	90 kg
Material	PVC
Gewicht	480 g
Maße (LxBxH)	70x50x19/7 cm
Ursprungsland	Made in China



==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de