



Bedienungsanleitung



**Radautomatik für Therapieliege
King Size zentral feststellbar, 4 Räder**

Art.Nr.: 23050

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Solid

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)



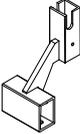
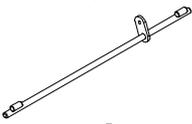
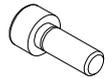
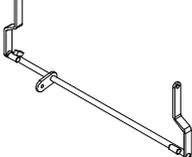
MEDIZINTECHNIK

Modell 65 9001

HWK® Radautomatik Kingsize

Aufbauanleitung

Lieferumfang:

				Beipack:			
POS 1	4x	Rollenadapter		POS 4	4x	Öse	
POS 2	1	Radhebebügel II, Kopfseite		POS 7	4x	Zylinderschraube M6x16	
POS 3	4x	Lenkrolle mit Schieber		POS 8	4x	Zylinderschraube M10x20	
POS 5	1x	Kupplungsstange		POS 9	16x	Scheibe D 10,5,	
POS 6	1x	Radhebebügel II, Fußteil, Radautomatik		POS 10	6x	U-Scheibe Kunststoff D 8,4x17x1,6	
				POS 11	2x	Linsenschraube, m.lskt, M 8 x 35	
				POS 12	2x	Mutter selbsts. M8, DIN 985	
				POS 13	4x	Kunststoffkappe 40 x 40 x 4	

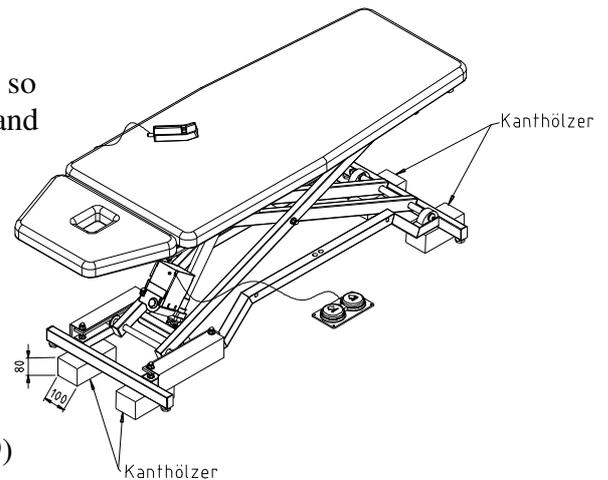
Schadens- und Vollständigkeitsprüfung

Nach Erhalt muß die Sendung sofort beim Öffnen auf Schäden und Vollständigkeit geprüft werden. Sollten Schäden festgestellt werden, sind diese innerhalb von zwei Werktagen zu melden. Nach dieser Frist können keine Gewährleistungsansprüche mehr geltend gemacht werden.


Es wird keine Verantwortung für unsachgemäße Montage übernommen.

Aufbauanleitung:

1. Liege anheben und auf jeder Seite 2 Kanthölzer so unterschieben, dass die Liege einen sicheren Stand auf den Hölzern hat (siehe Skizze).
2. Bodenausgleichsschrauben aus dem Grundrahmen herauschrauben.
3. Rollenadapter (POS 1) nach Zeichnung auf Grundrahmen aufschieben und mit Zylinderschraube (POS 8) + 2 Scheiben (POS 9) leicht anziehen.
4. Bodenausgleichsschraube und 2 Scheiben (POS 9) locker einschrauben.
5. Radbügel II Kopfseite (POS 2) in Rollenadapter (POS 1) einlegen (auf der Kopfseite, siehe Montagezeichnung). Radbügel II Fußteil (POS 6) in Rollenadapter einlegen (Montagezeichnung !). Lenkrolle mit Schieber (POS 3) einführen und Öse (POS 4) mit Schraube (POS 7) anschrauben.
6. Rollenadapter (POS 1) mittig ausrichten.
7. Kupplungsstange (POS 5) mit Radbügel II Kopfseite (POS 2) und Radbügel II Fußteil (POS 6) spielfrei verschrauben (POS 10, 11, 12). Die Kunststoffscheibe (POS 10) ist auch zwischen POS 2 und POS 5 bzw. zwischen POS 6 und POS 5 zu montieren (siehe Skizze).
8. Zylinderschraube (POS 8) fest anziehen.
9. Kunststoffkappen (POS 13) in die Rollenadapter (POS 1) einstecken.



Montagezeichnung:

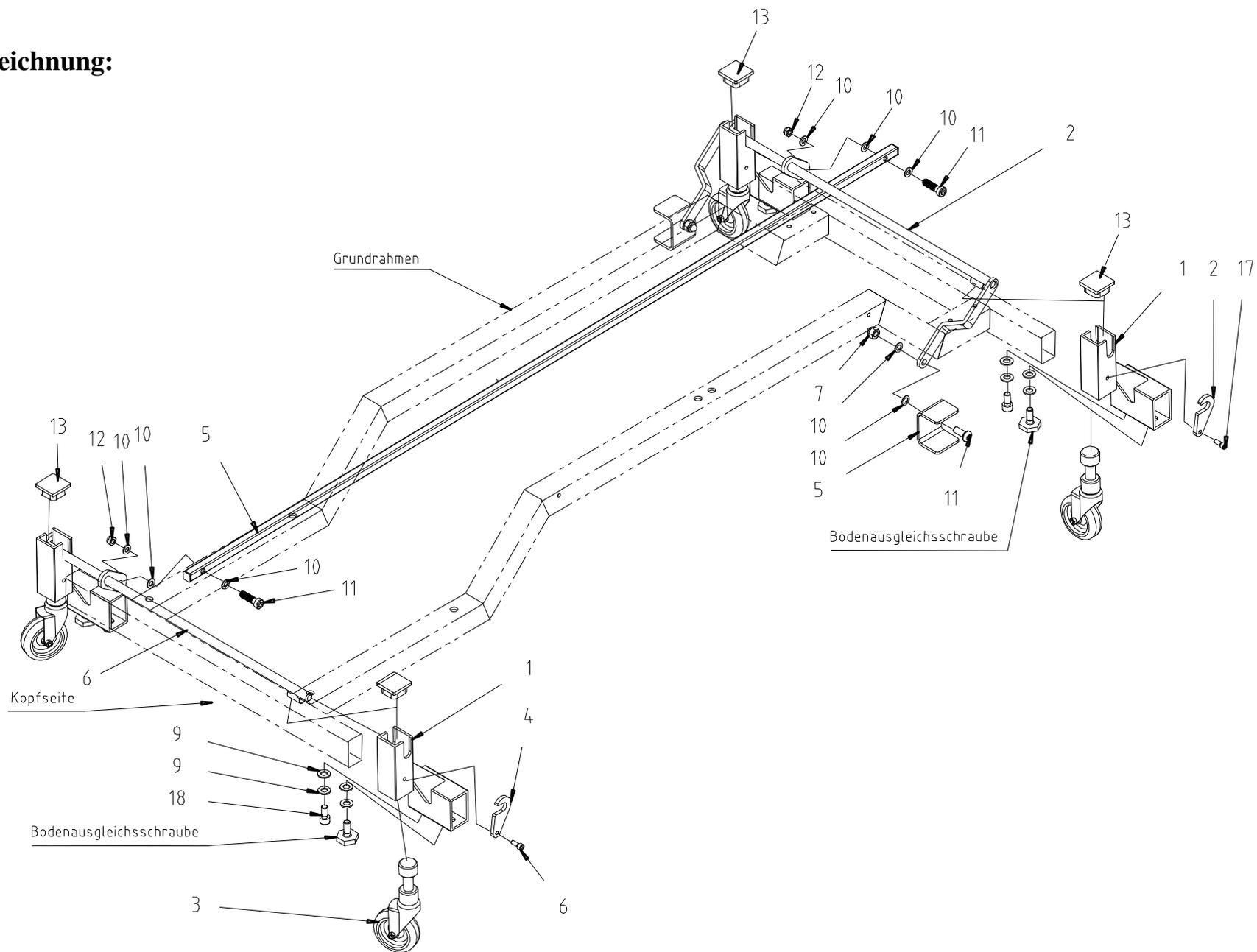

Werkzeugliste:

1. 2 x 13er Ringschlüssel
2. 1 x 6er Imbusschlüssel
3. 1 x 8er Imbusschlüssel
4. 4 x Kantholz 80 x 100 x 200 mm



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de