



KYPHO-MOBIL ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

ALLGEMEINES


Während der Patient die Unterschenkel leicht anhebt, wird das Kypho-Mobil von der Fußseite her soweit über die Behandlungsliege geschoben, bis die Kniekehlen und die abgerundete Vorderkante der Lagerungsplatte senkrecht übereinander liegen. Die Breite des Gestells kann über eine Stellschraube von 65 bis 80 cm reguliert werden.

Der umlaufende Gurt ermöglicht eine sichere Fixierung der Unterschenkel. Durch das Absenken der Behandlungsliege wird die angestrebte Kyphosierungsstellung ruckfrei, ohne Patientennachlagerung, erreicht. Dabei fährt das Kypho-Mobil in Richtung zum Patienten stufenlos mit.

Nach Abschluss der Therapie wird die Behandlungsliege wieder nach oben gefahren. Das Kypho-Mobil fährt in seine Ausgangsposition zurück.

LIEFERUMFANG

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
①	Rahmen mit Kissen	1x
②	Seitenteil mit Bremse	2x
③	Gurt	1x
④	Schraube	4x
⑤	Innensechskantschlüssel	1x

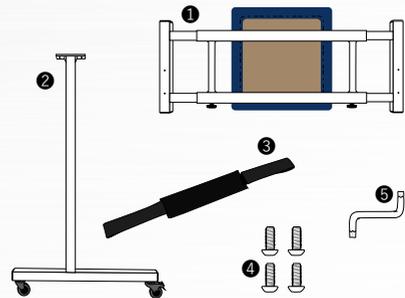

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass eine nicht sachgemäße Benutzung des Kypho-Mobils zu Verletzungen führen kann.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt und fest miteinander verschraubt sind. Nur so kann ein sicherer Gebrauch gewährleistet werden.

MONTAGE

Wichtige Hinweise:


Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie sich zunächst alle Arbeitsschritte sorgfältig durch.

VORBEREITUNGEN


Packen Sie alle Teile aus und legen Sie diese übersichtlich auf dem Boden aus.

Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile. Sollte ein Teil beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte.


SEITENTEILE UND GURT BEFESTIGEN

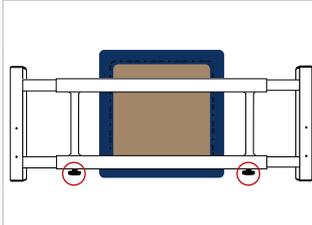


Legen Sie den Rahmen mit Kissen **1** auf den Boden, so dass die Holzplatte nach oben zeigt. Die Stellschrauben zeigen zu Ihnen.

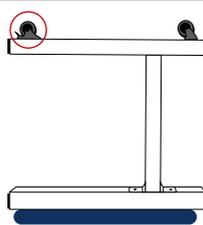

Setzen Sie das erste Seitenteil **2** auf den Rahmen, so dass die Bohrlöcher übereinanderliegen. Die Rolle mit Bremse zeigt zu Ihnen.

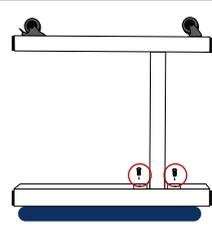


Setzen Sie die beiden Schrauben **3** ein und ziehen Sie diese mit dem Innensechskantschlüssel **4** fest.

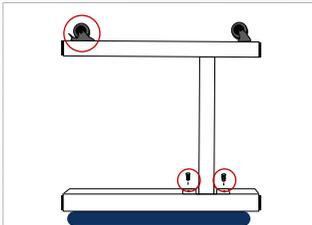

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Seitenteil **2**.



Stellen Sie das Kypho-Mobil auf die Rollen.

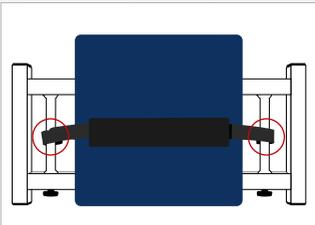

Befestigen Sie den Gurt **5** an den beiden Mittelstreben des Rahmens **1**.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kypho-Mobil, für Liegenbreite 65 bis 80 cm	
Art.-Nr.	23490
Farbe Polster	01-blau, 02-grün, 03-rot, 04-gelb, 05-schwarz, 06-weiß, 07-beige, 08-türkis, 10-braun, 11-grau, 14-violett, 15-leinen, 21-limone, 22-cyclam, 23-mango, 24-kastanie, 31-orchidee, 36-apricot, 42-taubenblau
Farbe Gestell	weiß
Maße (BxTxH)	65-80x47x110 cm
Ursprungsland	Made in Hungary



==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de