



==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



**Therapiehocker mit Polster,
Standard mit Gleitern**

Art.Nr.: 23564

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Therapiehocker

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Montageanleitung Drehhocker Standard (oder Exklusiv) mit Polster (oder Komfortpolster) und Gleiter




1)



2)



3)

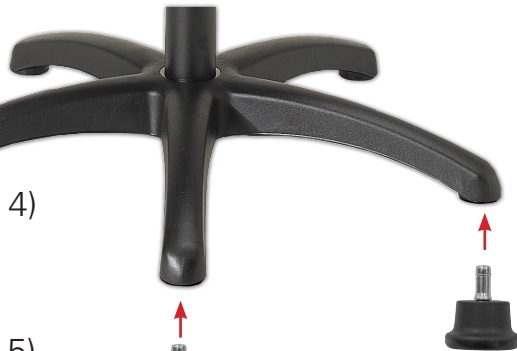

4)

5)



Im Karton befinden sich folgende Einzelteile:

- 1) Sitzplatte
- 2) Träger (Drehkreuz)
- 3) Gasdrucksäule
- 4) Fußkreuz
- 5) 5 Gleiter

Montagematerial:

- Inbusschlüssel
- 4 Sechskantschrauben
- 4 Unterlagscheiben

Sie montieren den Drehhocker wie folgt:

Legen Sie die Sitzplatte (1) mit der Unterseite nach oben vor sich.

Platzieren Sie den Sitzträger (2) mittig auf die Sitzplatte, sodass die vier Aussparungen des Trägers genau über den Löchern der Sitzplatte liegen.

Die Unterlagscheiben werden nun auf diese Aussparungen gelegt und die Schrauben mit dem Inbusschlüssel in die Löcher gedreht.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Gleiter (5) in das Fußkreuz. Stellen Sie nun das Fußkreuz mit den Gleitern (4+5) auf den Fußboden.

Danach führen Sie die Gasdrucksäule (3) mit dem großen Durchmesser in das Fußkreuz ein und montieren die Sitzplatte mit dem Träger (1+2) auf den kleinen Durchmesser des Höhenverstellelementes.

Um die richtige Verbindung der Konuselemente zu erreichen, belasten Sie bitte den Hocker mit Ihrem Körpergewicht.

Wenn man die Schraube aus der Gasdrucksäule (3) etwas rausschraubt löst die Gassäule schneller aus, bis hin zur Dauerauslösung.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de