



Bedienungsanleitung



**Sattelhocker mit Polster,
Standard mit Rollen**


Art.Nr.: 23568

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Sattelhocker

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Montageanleitung Therapiehocker Standard (oder Exklusiv) mit Polster und Rollen

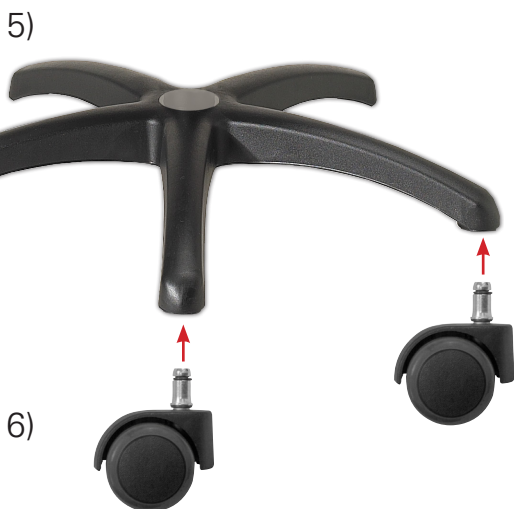

Im Karton befinden sich folgende Einzelteile:

- 1) Sitzplatte
- 2) Kunststoffabdeckung
- 3) Hebelauslöser
- 4) Gasdrucksäule
- 5) Fußkreuz
- 6) 5 Rollen

Montagematerial:

- Inbusschlüssel
- 4 Sechskantschrauben
- 4 Unterlagscheiben

Sie montieren den Drehhocker wie folgt:

Legen Sie die Sitzplatte (1) mit der Unterseite nach oben vor sich, mit der breiten Seite zu sich zeigend.

Platzieren Sie die Kunststoffabdeckung (2) nun auch mit der breiten Seite zu sich zeigend auf die Sitzplatte (1), sodass die Aussparungen der Kunststoffabdeckung genau über den Löchern der Sitzplatte (1) liegen.

Legen Sie nun den Hebelauslöser (3) so auf die Kunststoffabdeckung, dass die 4 Aussparungen über denen der Abdeckung liegen und die Hebel in Richtung breite Seite zeigen.

Die Unterlagscheiben werden nun auf die Aussparungen gelegt und die Schrauben mit dem Inbusschlüssel in die Löcher gedreht.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Rollen (6) in das Fußkreuz. Stellen Sie nun das Fußkreuz mit den Gleitern (4+5) auf den Fußboden.

Danach führen Sie die Gasdrucksäule (4) mit dem großen Durchmesser in das Fußkreuz ein und montieren die Sitzplatte mit dem Träger (1+2) auf den kleinen Durchmesser des Höhenverstellelementes.

Um die richtige Verbindung der Konuselemente zu erreichen, belasten Sie bitte den Hocker mit Ihrem Körpergewicht.

Wenn man die Schraube aus der Gasdrucksäule (3) etwas rausraubt löst die Gassäule schneller aus, bis hin zur Dauerauslösung.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de