



# NUBIS AUFBLASBARER HOCKER, 35x50 cm

## ANLEITUNG

Art.-Nr.  23933 · Kategorie:  Hocker

# NUBIS<sup>®</sup> HOCKER

PORTABLE PHYSIO SOLUTIONS

## BENUTZERHANDBUCH **DE**

TRAGBARER HOCKER FÜR MASSEURE



# NUBIS<sup>®</sup>

PORTABLE PHYSIO SOLUTIONS

## INHALT

1.	Einleitung	3
2.	Produktübersicht	3
3.	Sicherheitshinweise	4
4.	Einrichtung	5
5.	Verpackung	6
6.	Reinigung Instandhaltung	7
7.	Technische Daten	7
8.	Garantie und Haftung	8



## 1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Nubis Hocker entschieden haben.

Nubis Hocker ist ein extrem leichter und tragbarer, druckbasierter Hocker. Der Hocker wurde für Masseure entwickelt, insbesondere für den Einsatz im Feld. Es ist ideal, den Hocker in Kombination mit dem tragbaren Nubis Massageliege zu verwenden, um das beste tragbare System für Massagen zu haben. Er ist leicht aufzustellen und kann bei Nichtgebrauch einfach im Transportbeutel transportiert werden.

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Um den Nubis Hocker richtig und sicher zu benutzen, ist es wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Sollte etwas unklar sein, zögern Sie nicht, uns oder Ihren Händler zu kontaktieren.

## 2. PRODUKTÜBERSICHT

Inhalt von Nubis Hocker:

1. Pneumatischer Hocker
2. Einstellbare Füße
3. Transportbeutel

Zubehör für den Stuhl:

4. Fußpumpe



### 3. SICHERHEITSHINWEISE OBJEKTBEREICH

#### 3.1. Allgemeine Anweisungen:

- Das Produkt sollte von fachkundigem Personal aufgestellt werden.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Druck des Hockers und pumpen Sie ihn voll auf.

#### 3.2. Handhabung des Hockers:

- Die Fläche, auf der der Hocker steht, muss trocken, eben und frei von Hindernissen sein.
- Bringen Sie keine scharfen Gegenstände auf oder in die Nähe des Hockers.
- Die maximale Gewichtsbelastung von 120 kg sollte nicht überschritten werden.
- Achten Sie beim Aufstellen und Benutzen des Hockers im Freien darauf, dass der Platz eben, trocken und frei von Hindernissen ist, damit das Produkt nicht beschädigt wird.
- Verpacken, lagern oder transportieren Sie den Hocker niemals, wenn er nass oder schmutzig ist. Um Schäden zu vermeiden, lassen Sie das Material nach der Reinigung gut trocknen, bevor Sie es verwenden oder lagern.
- Lassen Sie den Hocker niemals unbeaufsichtigt draußen stehen und halten Sie den Luftdruck unter den in dieser Anleitung beschriebenen Höchstwerten.
- Setzen Sie den aufgeblasenen Hocker nicht extremen Temperaturen aus (zulässiger Grenzwert von -20 °C bis +50 °C).

#### 3.3 Aufblas-Prozess:

- Füllen Sie nicht über den in den technischen Daten angegebenen maximalen Luftdruck auf. Dies kann nicht passieren, wenn Sie die Originalpumpe von Airfun d.o.o. verwenden.
- Achten Sie beim Aufblasen darauf, dass kein Staub oder Sand in den pneumatischen Einsatz gelangt.
- **Wichtig:** wenn Sie die elektrische Pumpe von Nubis zum Aufblasen des Hockers verwenden, müssen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise zur Handhabung der Pumpe und zum Aufblasen des Produkts beachten, die Sie im Benutzerhandbuch des tragbaren Massageliege NubisPro finden.



#### 4. EINRICHTUNG

- 4.1 Nehmen Sie das Produkt aus der Kartonverpackung und überprüfen Sie alles auf mögliche Transportschäden.
- 4.2 Wählen Sie den richtigen Ort für die Aufstellung des Hockers. Achten Sie beim Benutzen des Hockers im Freien darauf, dass der Platz eben, trocken und frei von Hindernissen ist, damit das Produkt nicht beschädigt wird.
- 4.3 Nehmen Sie den Hocker aus dem Transportbeutel und stellen Sie ihn so hin, dass Sie das Ventil leicht erreichen können. Achten Sie darauf, wie er im Beutel verpackt ist, damit Sie es genauso machen können, wenn Sie ihn aufbewahren wollen.
- 4.4 Aufblasen des Hockers:

1. Öffnen (abschrauben) Sie die Ventilkappe des Hockers, drücken Sie den Knopf in die Stellung „OUT“ und schließen Sie den Schlauch Ihrer Pumpe an das Ventil an.



Wichtig: wenden Sie keine Gewalt an!

2. Beginnen Sie mit dem Aufpumpen des Hockers mithilfe der Fußpumpe. Wenn der maximale Druck erreicht ist, nehmen Sie den Schlauch heraus.
3. Ziehen Sie nach dem Aufpumpen die Ventilkappe fest (im Uhrzeigersinn). Nur die Kappe des Ventils kann die endgültige Dichtheit gewährleisten.



**Wichtig:** wenn Sie die elektrische Pumpe von Nubis zum Aufblasen des Hockers verwenden, müssen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise zur Handhabung der Pumpe und zum Aufblasen des Produkts beachten, die Sie im Benutzerhandbuch des tragbaren Massage liege NubisPro finden.

- 4.5 Genießen Sie das Produkt!

**5. VERPACKUNG**

- 5.1 Öffnen (abschrauben) Sie die Ventilkappe, drücken Sie den Knopf in die Position „IN“.
- 5.2 Beginnen Sie damit, die Luft aus dem Hocker abzulassen, indem Sie den Hocker von Hand in die Ausgangsposition drücken, in der er vollständig flach ist und in den Transportbeutel passt.
- 5.3 Wenn die Luft vollständig aus dem Hocker entwichen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Knopf des Ventils wieder in die Position „OUT“ drücken und die Ventilkappe schließen! Dadurch wird verhindert, dass die Kappen das Gewinde des Ventils beschädigen.
- 5.4 Packen Sie den Hocker wieder in den Transportbeutel.
- 5.5 Ihr Nubis Hocker ist nun bereit für den Transport oder die Lagerung.

## 6. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

### 6.1 Reinigung des Hockers:

- Reinigen Sie den Hocker mit einem feuchten Tuch (verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch).
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einer pH-neutralen Seife.
- Verwenden Sie niemals Mittel, die aggressive Detergenzien enthalten (starke Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Bleichmittel oder Scheuermittel).

### 6.2 Pflege durch den Benutzer:

- Regelmäßige Reinigung des Hockers.
- Verpacken und lagern Sie den Hocker immer, wenn er trocken ist.
- Wir empfehlen Ihnen dennoch, die Hauptfunktionen des Produkts regelmäßig zu überwachen und sich im Falle von Fehlfunktionen an den autorisierten Händler oder Hersteller zu wenden.

## 7. TECHNISCHE DATEN

Produkt	Nubis Hocker		
Modell		Nubis stool, H50	Nubis stool, H60
Code		700-3550	700-3560
Hocker	Abmessungen (L x B x H)	35 x 50 cm	35 x 60 cm
	Material	- Pneumatischer Einsatz - 100 % Polyester (Bezug) - Holzplatte - Plastikfüße	- Pneumatischer Einsatz - 100 % Polyester (Bezug) - Holzplatte - Plastikfüße
	Gewicht	2,5 kg	2,6 kg
	Tragfähigkeit	120 kg	120 kg
Fußpumpe	Abmessungen (L x B x H)	26 x 20 x 8 cm	26 x 20 x 8 cm
	Maximaler Druck	500 mbar	500 mbar
	Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
	Zeit zum Aufblasen	25 s	25 s
Transportbeutel	Abmessungen (Durchmesser x H)	38 x 13 cm	38 x 13 cm
	Gewicht (mit Hocker)	2,6 kg	2,7 kg
	Gewicht (mit Hocker und Pumpe)	3,8 kg	3,9 kg

*Airfun d.o.o. behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen zu ändern.*



## 8. GARANTIE UND HAFTUNG

### 8.1 Garantie:

- Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr. Sie beginnt mit dem Tag des Kaufs.
- Sollten während der Garantiezeit Reparaturen erforderlich sein, muss der Kunde Airfun d.o.o. oder den örtlichen Händler informieren. Die Garantie muss durch die Kaufrechnung nachgewiesen werden.
- Die Garantie verpflichtet Airfun d.o.o., die Kosten für die Reparatur von Komponenten zu tragen, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit ausfallen könnten.
- Die Garantie gilt nicht für Defekte oder schlechte Leistung in folgenden Fällen:
  - bei unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung des Produkts durch den Kunden;
  - wenn der Kunde die Anforderungen und Empfehlungen in diesem Benutzerhandbuch nicht befolgt;
  - wenn Änderungen oder Reparaturen von nicht qualifiziertem und vom Hersteller nicht autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

### 8.2 Lebensdauer des Produkts und Reparaturen:

- Die erwartete Lebensdauer dieses Produkts wird auf 5 Jahre geschätzt.
- Reparaturen und Ersatzteile sind während der erwarteten Lebensdauer, also 5 Jahre ab Kaufdatum, erhältlich.
- Alle Reparaturen müssen von Airfun d.o.o. oder einem lokalen autorisierten Händler durchgeführt werden.
- Reparaturen können auch vom Benutzer nach vorheriger Absprache mit Airfun d.o.o. und laut den Anweisungen für den Service durchgeführt werden.

### 8.3 Produkthaftung:

der Hersteller oder seine Lieferanten oder Wiederverkäufer können nicht für die Folgen haften, die dem Benutzer, dem Patienten oder dem Produkt selbst durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, falsche Auslegung oder Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs oder durch von nicht autorisiertem Personal durchgeführte Reparaturen entstehen.

#### HERSTELLER:

**AIRFUN d.o.o.**

Ljubljanska cesta 45  
SI- 1241 Kamnik  
Slowenien, EU

Telefon: +386 1 8319 194  
E-mail: info@nubis-physio.com  
Web: www.nubis-physio.com





==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)