



Bedienungsanleitung



cosiMed Desinfektionsreiniger Konzentrat, 5 l

Art.Nr.: 24142

►► zum Produkt ...

Reiniger

►► zur Kategorie...

Produkt - Information

cosiMed Desinfektionsreiniger

Produktmerkmale

Konzentrat zur Flächendesinfektion mit intensiver Reinigungswirkung und ausgeprägtem Schmutztragevermögen. Reinigt und desinfiziert glatte, porenfreie Oberflächen in einem Arbeitsgang.

cosiMed Desinfektionsreiniger ist frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor.

Wirkungsweise

Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren (HBV und HIV).

Einsatzbereiche

Zur gleichzeitigen Desinfektion und intensiven Reinigung von glatten, porenfreien Oberflächen. Das Produkt wird üblicherweise mit der Zwei-Eimer-Wischmethode angewandt.

Nicht geeignet für Acrylglas (z.B. für die Liegeflächen von Solarien) und für Liegenbezüge aus Kunstleder.

Anwendung

1. Für die Flächendesinfektion ist das Produkt mit Wasser verdünnt wie folgt anzuwenden:

2 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 15 Minuten
1,5 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 1 Stunde
0,75 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 4 Stunden

2. Reinigung und Desinfektion von Umwälzpumpen und Rohrsystemen:

Zur gleichzeitigen Reinigung und Desinfektion von Umwälzpumpen und Rohrsystemen in Kombiwannen 100 ml cosiMed Desinfektionsreiniger nach Vorschrift des Wannenherstellers eindosieren und im System umpumpen, die Desinfektionslösung 1 Stunde stehen lassen. Vor der nächsten Wannenbenutzung abpumpen und gründlich ausspülen.

7/2010

cosiMed Desinfektionsreiniger

- 2 -

Zusammensetzung

100 g Konzentrat enthalten:

Didecyldimethylammoniumchlorid	3,350 g
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	3,325 g
Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid	3,325 g

Inhaltsstoffe:

5 – 15 % Kationische Tenside (Desinfektionsmittel), 5 – 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional)

Handhabung

X_n (Gesundheitsschädlich)	Dieses Konzentrat ist gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gefahr ernster Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
N (Umweltgefährlich)	

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend)

Alle weiteren sicherheitsrelevanten Angaben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Abfüllung

Art. 08.07 5 l-Kanister

- 3 -

7/2010

cosiMed Desinfektionsreiniger

- 3 -

Hinweise

Dem Präparat darf auf keinen Fall ein anderes Produkt (z.B. ein Reinigungsmittel) zugesetzt werden, da hierdurch die desinfizierende Wirkung beeinträchtigt oder gar vollständig aufgehoben werden könnte.

Nicht geeignet für die Liegeflächen von Solarien und für Liegenbezüge aus Kunstleder. Für die Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder empfehlen wir cosiMed Desinfektionsmittel.

UBA 0237 0013
N-34344



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de