



# Bedienungsanleitung



**cosiMed Schnelldesinfektion,  
gebrauchsfertig, 10 l**

**Art.-Nr. 24143**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**

**Flächendesinfektion**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

# Produktinformation

## cosiMed Schnelldesinfektion

### Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel

#### Produktmerkmale

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel zum Aufsprühen auf Oberflächen. cosiMed Schnelldesinfektion ist wirksam ohne Alkohol. Das Produkt ist frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor.

#### Wirkungsweise

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren (z.B. HBV/HIV).

#### Einsatzbereiche

Zur Desinfektion aller glatten, porenfreien Oberflächen. cosiMed Schnelldesinfektion ist auch geeignet zur Desinfektion der Liegeflächen von Solarien (die Rezeptur wurde von Röhm GmbH geprüft auf die Materialbeständigkeit von Acrylglas).

**Das Präparat ist besonders geeignet zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU).** Führende Hersteller von PVC- und PU-Folien haben die Unbedenklichkeit der Rezeptur von cosiMed Schnelldesinfektion auf ihren Kunstleder-Qualitäten im Labor getestet und empfehlen unser Mittel ausdrücklich.

Bei allen Oberflächen mit direktem Hautkontakt empfehlen wir nach der Desinfektion eine Zwischenlage zu verwenden (Tuch, Vlies).

#### Anwendung zur Flächendesinfektion

Für die Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allgemeinen Praxis ist für dieses gebrauchsfertige Produkt eine Einwirkungszeit von 1 Minute vorgeschrieben. Es wird mit einem Sprüher auf die betreffende Oberfläche aufgesprüht.

Um Atemreizungen zu vermeiden empfehlen wir unsere 1 Liter Sprühflasche mit Schaumdüse zu verwenden. Der Schaum wird mit einem trockenen Tuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Nach 1 Minute Einwirkungszeit wird die Fläche mit einem frischen trockenen Tuch trocken gerieben, danach kann der desinfizierte Gegenstand wieder benutzt werden.

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

Didecyldimethylammoniumchlorid	0,25 g
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	0,25 g
Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid	0,25 g

Inhaltsstoffe: < 1 % kationische Tenside (Desinfektionsmittel)

#### Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend).

Alle weiteren sicherheitsrelevanten Angaben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

---



**Produktinformation**  
**cosiMed Schnelldesinfektion**  
**Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel**

Seite 2 von 2

Stand: 22.01.2018

---

**Abfüllung**

Art. 08.28	1 Liter Flasche incl. Sprüher mit Schaumdüse
Art. 08.29	1 Liter Flasche ohne Sprüher
Art. 09.19	Sprühaufsatz mit Schaumdüse
Art. 08.33	5 Liter Kanister
Art. 08.32	10 Liter Kanister

**Hinweise**

Dem Präparat darf auf keinen Fall ein anderes Produkt (z.B. ein Reinigungsmittel) zugesetzt werden, da hierdurch die desinfizierende Wirkung beeinträchtigt oder gar vollständig aufgehoben werden könnte.

Hautberührende Oberflächen (z.B. Sitzflächen) nach der Desinfektion unbedingt mit einem saugfähigen Tuch trocken reiben! Alternativ empfehlen wir, diese Flächen zur Benutzung abzudecken (z.B. mit einem Tuch oder Vlies).

Keine Reinigungsutensilien (z.B. Tücher) benutzen, die schon für andere Produkte verwendet wurden.

Starke Verunreinigungen sind vor der Desinfektion am besten mit einem Einwegtuch aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen.

N-50885

---



**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0  
Fax: +49 (0) 6331 1480-220  
E-Mail: [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
Web: [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)