



ELASTIK-FIXIERGURT FÜR EISBEUTEL ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

ALLGEMEINES

Der Elastik-Fixiergurt hält Eisbeutel sicher auf der verletzten Stelle. Er ist achtfach verstellbar und kann problemlos an Arm, Oberschenkel oder Fußgelenk fixiert werden.

LIEFERUMFANG

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Elastik-Fixiergurt	1x

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass eine nicht sachgemäße Benutzung des Fixiergurts zu Verletzungen führen kann.

Der Gurt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Bewahren Sie den Gurt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Wichtige Hinweise:

Ziehen Sie den Gurt nicht zu stramm. Die Elastizität des Bandes verringert sich bei häufiger Anwendung.



Ziehen Sie die Eisbeutelkappe durch das einzelne Loch des Bandes.



Drehen Sie den Gurt auf den gewünschten Bereich und wickeln Sie den Beutel mit dem Gurt ein.



Befestigen Sie nun den Eisbeutel im gewünschten Loch.

ACHTUNG! Beim Anlegen darf der Gurt nicht zu stramm befestigt werden, um die Blutzirkulation nicht zu blockieren.

PFLEGE UND REINIGUNG

Lagern Sie den Fixiergurt an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lassen Sie den Gurt vollständig trocknen, wenn er feucht ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Elastik-Fixiergurt für Eisbeutel
Art.-Nr.	24334
Durchmesser Löcher	Lochdurchmesser 3,5 cm (ungedehnt) - ca. 7,5 cm dehnbar
Umfang von...bis	13,5 cm - 53 cm
Maße (BxTxH)	60,5x8 cm
Ursprungsland	Made in Germany



==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de