



==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



**Paraffin-Wärmeträger groß für
Heißluft, 54x36 cm, 2400 g**

Art.Nr.: 24516

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Moor Wärmeträger

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Gebrauchsanweisung

Paraffin-Wärmeträger

Art.Nr.: 24514/24516



www.sport-tec.de

Lemberger Straße 255 Tel.: 0 63 31/14 80-0
66955 Pirmasens Fax: 0 63 31/14 80-220
www.sport-tec.de info@sport-tec.de

Der Wärmeträger beinhaltet einen Schaumstoff - Wärmespeicher mit Hartparaffinfüllung nach DAB10 und ist vakuumverschweißt.

Dieses Herstellungsverfahren hat gegenüber herkömmlichen Kompressen den Vorteil einer besseren Modellierbarkeit.

Sicherheitshinweis für den Anwender:

Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80 ° C. In einem Wärmeschrank wird der Wärmeträger auf ca. 50 - 60 ° C erwärmt. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 60 ° C nicht überschreiten

Der Hartparaffin - Wärmeträger ist grundsätzlich konstruiert für die Erwärmung in Wärmeschränken, sollte er jedoch in einem Wasserbad erwärmt werden, darf er nicht mit dem Boden des Erwärmungsgerätes in Berührung kommen, da die Folie durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Dieses verhindert man, indem ein Sieb auf den Boden des Gerätes gelegt wird.

Anwendungsweise:

Der Wärmeträger wird auf die zu behandelnde Stelle des Körpers aufgelegt und der Patient mit Folien und Decken gut eingepackt. Der Wärmeträger wird mit besonders gutem Erfolg in Verbindung mit Heilmoor-Packungen N (Einwegpackungen) benutzt.

Sicherheitshinweis für den Anwender: Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, daß der erwärmte Wärmeträger **nicht** bei einer höheren Temperatur als vorgesehen angewendet wird.

Die Behandlungsdauer beträgt ca. 25 - 50 Minuten.

Um die behandelnde Fläche zu vergrößern, legt man zwei oder mehrere Wärmeträger aneinander.

Reinigung:

Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Wenn die og. Punkte zur Pflege beachtet werden, läßt sich die Lebensdauer unserer Wärmeträger erhöhen. .

Größe : 27 x 36 cm	Inhalt ca.1200 g	/10 Stück je Karton
36 x 54 cm	Inhalt ca.2400 g	/ 5 Stück je Karton

Sicherheitshinweis für den Anwender:

Zum eigenen Schutz sollte der Anwender während der Erwärmung des Wärmeträgers und der Vorbereitung zur Anwendung beim Patienten Schutzhandschuhe tragen.

In kaltem Zustand den Wärmeträger nicht knicken.

Nicht im Wasserbad kochen lassen.

Vor dem Auflegen durch Drücken auf Dichtigkeit prüfen.

Nicht mit scharfen oder kantigen Gegenständen die Außenfolie beschädigen.

Den Wärmeträger in kaltem Zustand nicht fallen lassen, da sonst mit einer Beschädigung der Folie zu rechnen ist.

Der Wärmeträger eignet sich besonders gut für Wärmeschränke.

Der Wärmeträger hat bei sachgemäßer Anwendung und täglichem Gebrauch eine Benutzungsdauer von ca. 5 Monaten.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de