



UNIVERSAL-WÄRMETRÄGER MIT GELFÜLLUNG ANLEITUNG

Art.-Nr. ☐ 24518 · Kategorie: ☐ Moor Wärmeträger

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

ALLGEMEINES

Der Universal-Wärmeträger eignet sich für direkte Wärmeanwendungen, aber auch für die Anwendung von Moor-Einmalpackungen.

Der Wärmeträger kann in der Mikrowelle, im Wasserbad oder im Heißluftofen erwärmt werden. Der Inhalt ist nicht toxisch, die Hülle besteht aus Verbundfolie auf Gewebebasis.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Anwendung die Unversehrtheit des Wärmeträgers beispielsweise durch Druckanwendung, um eine Gefahr des Aufplatzens an Bruchstellen, Beschädigungen, Schweißnähten und Löchern zu erkennen. Prüfen Sie ebenfalls vor jeder Anwendung, ob das Gewebe angebrannt ist.

Beschädigte oder angebrannte Wärmeträger dürfen nicht verwendet werden!

Der Wärmeträger darf nicht über 70°C erwärmt werden.

Beachten Sie die Hinweise zum korrekten Erwärmen des Wärmeträgers. Falsches Erwärmen kann den Wärmeträger zerstören.

Vor Therapiebeginn und bei Problemen medizinischer Art immer den Arzt oder Therapeuten befragen.

Vor Anwendung der Wärmeträger am Patienten ist durch den Anwender immer die Temperatur der Wärmeträger zu kontrollieren, da diese z.B. durch Nichtbeachtung der Anleitung übertemperiert sein könnten (Achtung Verbrennungsgefahr!).

ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE

Wichtige Hinweise:

Die Erwärmung in einer Mikrowelle muss unter Aufsicht erfolgen!

Es dürfen nur unbeschädigte Wärmeträger in einem Gerät mit 750 Watt max. erwärmt werden. Folgende Funktionen müssen zudem ausgeschaltet sein: Grill, Ober-/Unterhitze, Heißluft und Dampfgaren.

Den unbeschädigten Wärmeträger möglichst flach in der Mikrowelle platzieren. Die Mikrowelle bei 750 Watt auf eine Zeit von 3 Minuten einstellen und einschalten. Die Zeit von 3 Minuten darf nicht überschritten werden.

Entnehmen Sie den Wärmeträger anschließend aus der Mikrowelle und prüfen Sie die Temperatur. Breiten Sie den Wärmeträger in seiner vollen Größe aus und kneten Sie ihn durch um die erwärmte Füllung möglichst gleichmäßig im Wärmeträger zu verteilen.

Sollte die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht sein, legen Sie den Wärmeträger erneut in die Mikrowelle und wiederholen Sie den Vorgang.

ERWÄRMUNG IM HEISSLUFTSCHRANK

Den Wärmeträger flach auf das Blech legen. Zwischen Blech und Wärmeträger bitte ein Stück Papier legen. Der Wärmeträger kann auch auf einen Gitterrost gelegt werden. Warmluftofen auf 70°C stellen. Wärmezeit ca. 15 Minuten.

Warnhinweis: Bei zu langer Erwärmung verbrennt der Wärmeträger. Der Wärmeträger darf keine Blechteile berühren! Die Folie schmilzt!

ERWÄRMUNG IM WASSERBAD

Den Wärmeträger in 70°C heißem Wasser ca. 30 Minuten erhitzen. Das Wasser darf nicht kochen und der Wärmeträger darf keine Berührung mit dem Gefäßboden haben. Bitte nicht Tag und Nacht im Wasserbad lassen, dadurch verkürzt sich die Haltbarkeit des Wärmeträgers.

Warnhinweis: Bitte darauf achten, dass der Wärmeträger keine Berührung mit dem Gefäßboden hat. Die Folie schmilzt!

MELDEPFLICHT

Achtung: Alle im Zusammenhang mit der Kalt- /Warmkomresse auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

GEWÄHRLEISTUNG

Bei sachgemäßer Handhabung nach der Gebrauchsanweisung geben wir ein Jahr Gewährleistung (Verbrauchsgegenstand).

ENTSORGUNG

Defekte Wärmeträger in den Hausmüll geben. Kein Sondermüll.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Universal-Wärmeträger mit Gelfüllung, klein	Universal-Wärmeträger mit Gelfüllung, groß
Art.-Nr.	24518	24519
Farbe	blau	
Inhalt	Gelfüllung (nicht toxisch)	
Material	Verbundfolie auf Gewebebasis	
Gewicht	1.900 g	3.400 g
Maße (BxTxH)	42x28 cm	61x33,5 cm
Hersteller	Ekamed GmbH & Co. KG, An der Schelle 2, 31174 Schellerten	
Ursprungsland	Made in Germany	



Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de

