



==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



**Warmhalteschrank WT 5070-14 für
Therm-Packungen inkl. 10 Bleche**

Art.Nr.: 24927

▶▶▶ [zum Produkt...](#)

Warmhalteschränke

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR WÄRMESCHRANK FÜR THERM-PACKUNGEN

**Modell WT 3050-8
 WT 3050-14
 WT 5070-14**

Inhaltsübersicht:	Allgemeine Sicherheitsregeln
	1. Allgemeines
	2. Aufstellung und Anschluss
	3. Inbetriebnahme
	4. Arbeiten mit dem Warmhalteschrank
	5. Pflege
	6. Störung, Ursache, Beseitigung
	7. Hinweis
	8. Technische Daten
	9. Elektroschaltplan

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes und muss griffbereit aufbewahrt werden

Allgemeine Sicherheitsregeln

- Um das Risiko einer Verletzung zu verringern, erlauben Sie Kindern die Benutzung dieses Gerätes grundsätzlich nicht.
- Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Menschen gedacht und nicht z. B. für Tiere geeignet.
- Benützen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen und in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie kein Zubehör das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Stecken oder drücken Sie niemals einen Gegenstand in irgendwelche Öffnungen.
- Benützen Sie die Anlage nur in der Ausführung wie Sie vom Hersteller geliefert wurde mit den Originalbauteilen. Veränderungen können zur Gefahr für Mensch und Gerät führen.
- Lassen Sie die Anlage nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal fachgerecht anschließen.
- Sollte die Anlage mehr als 8 Stunden pro Tag in Betrieb sein, empfehlen wir eine jährliche Wartung der gesamten Anlage um Stillstandzeiten zu vermeiden.

Hinweis: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Instandsetzung des Gerätes ist nur durch uns oder durch eine von uns ausdrücklich dazu ermächtigte Stelle vorzunehmen.

- Im betriebsbereiten Zustand besteht am Gerät und an Teilen des Geräts Verbrennungsgefahr. Wir empfehlen entsprechende Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, usw.).

Hinweis: Durch elektromagnetische Felder von anderen Geräten (z.B. Handys), kann unter Umständen eine Beeinflussung der Elektronik auftreten. Diese Störungen sind jedoch gefahrlos für den Therapeuten und für das Gerät – sie können lediglich am Gerät kurzfristig Fehlfunktionen auslösen.

- Beachten Sie vor allem die Hinweise, Sicherheitshinweise und Regeln sowie die Bemerkungen in dieser Gebrauchsanweisung. Sie dienen der Sicherheit des Therapeuten und der Lebensdauer der Anlage.

Entsorgung der Anlage am Ende der Nutzungsdauer. Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes und aller weiteren Bauteile wie z. B. Steuerung, etc. die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.



Achtung: Der Service darf nur von autorisierten Händlern durchgeführt werden, sonst erlischt eventuell die Konformitätserklärung.

1. Allgemeines

- 1.1** Wir empfehlen dringend, die vorliegende Anleitung sorgfältig durchzulesen, um Bedienungsfehler zu vermeiden.
- 1.2** Die Wärmeschränke wurden speziell zum Bereithalten von therapeutisch optimalen Packungen konstruiert. Durch die Verwendung dieser Schränke kann die Praxisarbeit wesentlich rationalisiert werden.

2. Aufstellung und Anschluss

- 2.1** Sofort nach dem Auspacken ist das Gerät auf mechanische Beschädigung und lose Teile im Inneren zu überprüfen. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf in diesem Fall nicht in Betrieb gesetzt werden.
- 2.2** Je nach Einsatzfall wird der Wärmeschränk nur als Einzelgerät aufgestellt. Für den Einsatz in einer Fangküche, befinden sich im Sockel des Warmhalteschranks 4 Gewinde, in die die mitgelieferten Verstellfüße eingeschraubt werden können. So lassen sich Unebenheiten im Fußboden durch das unterschiedlich lange Einstellen der Füße ausgleichen (nicht bei WT3050-8).
- 2.3** Der Anschluss erfolgt mit dem Gerätestecker an einer bauseits vorhandenen Schuko-Steckdose 230V / 50Hz. Gesamtanschlusswert: 1845 Watt.

3. Inbetriebnahme

Die Steuerung des Wärmeschranks ist in der Bedienung problemlos. Die Anordnung der Bedienungselemente ist logisch, so dass jeder bereits nach kurzer Zeit mit der Funktionsweise vertraut sein kann.

3.1 Bedienungselemente



EIN / AUS Schalter

Temperatureinstellung

3.2 Einschalten der Steuerung

Durch Betätigung des Netzschalters wird die Steuerung des Wärmeschrankes eingeschaltet (grüne Kontrolllampe ein). Das Gebläse schaltet ein, und die Temperatur wird auf den eingestellten Soll-Temperaturwert geregelt. In der Regel beträgt diese Temperatur 70°C. Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanweisung des Herstellers für Thermpackungen.

4. Arbeiten mit dem Wärmeschrank

Nach dem Einschalten kann nun die Arbeit mit dem Warmhalteschrank beginnen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

- 4.1 Bei Entnahme aus dem Wärmeschrank mit 70°C hat die THERM-Packung eine Oberflächentemperatur von etwa 70°C, die zwar sehr schnell fällt, dennoch besteht für einige Minuten bei längerem, direktem Hautkontakt Verbrennungsgefahr.
Es ist daher außerordentlich wichtig, die THERM-Packung einige Minuten (ca. 5 Minuten) vor Behandlung aus dem Wärmeschrank zu nehmen, damit es auf ein hautverträgliches Maß abkühlen kann.
- 4.2 Bei vollbelegtem Wärmeschrank werden etwa 4 Stunden benötigt, um sie von Zimmertemperatur auf 70°C zu erwärmen. Achtung: Eine Überhitzung der Packung kann zu Beschädigung des Produktes führen! Eine Erwärmung auf bis zu 70°C führt zu keiner Beeinträchtigung und/oder Beschädigung des Produktes, so dass keine Höchst-Erwärmdauer erforderlich ist.
- 4.3 Nach einer Behandlung dauert es etwa 30 Minuten, bis die noch warme Packung in dem Wärmeschrank wieder die gewünschte Temperatur von 70°C erreicht hat. Wenn der geschlossene Wärmeschrank über Nacht abgeschaltet wird, beträgt die Aufheizzeit am nächsten Morgen nur 1,5 bis 2 Stunden, da die Wärme gut gehalten wird.

Wichtig: Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Thermpack-Hersteller, da diese genaue Hinweise für Therapiehandhabung und Hygiene machen.

4.4 Ausschalten des Wärmeschranks

Durch Betätigung des Netzschalters wird die Steuerung ausgeschaltet (grüne Kontrolllampe aus).

5. Pflege

Das Pflegen der Edelstahlflächen sollte mit dem Edelstahl-Pflegemittel "Nirostol" vorgenommen werden. Das Pflegen der Arbeitsfläche sorgt für ein leichtes Gleiten der Alu-Bleche. Verschmutzte Flächen reinigen Sie leicht mit "Terpentin-Ersatz" aus der Drogerie.

6. Störung, Ursache, Beseitigung

6.1 Die Packungen sind trotz Einstellung auf 70°C zu kalt.

- 6.1.1 Der Maximalbegrenzer hat eventuell ausgelöst. Zur Absicherung gegen Überhitzen ist im Gerät ein zusätzlicher Sicherheits-Temperaturbegrenzer eingebaut. Bei einem Defekt an der Steuerung oder bei Ausfall des Gebläses und einer damit verbundenen Überhitzung, schaltet dieser Begrenzer das Gerät aus. Zum Wiedereinschalten muss wie folgt vorgegangen werden:

Schalten Sie den Wärmeschrank aus. Öffnen Sie die Tür(en). Wenn sich die zu starke Wärme im Warmhalteschrank abgebaut hat, setzt sich der Begrenzer von alleine wieder zurück. Jetzt können Sie feststellen, ob das Gebläse noch funktioniert.

7. Hinweis

Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt (VDE 0750, Teil 1, Abschn. 7.2.2). Die Instandsetzung des Gerätes ist nur durch uns oder durch eine von uns ausdrücklich ermächtigte Stelle vorzunehmen (VDE 0750, Teil 1, Abschnitt 7.2.5)

Entsorgung des Gerätes am Ende der Nutzungsdauer:

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes und aller Bauteile wie z.B. Steuerung, Motor, etc. die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

8. Technische Daten

	WT 3050-14	WT 5070-14	WT 3050-8
Abmessungen (BxTxH)	650x710x820 mm	900x710x820 mm	800x470x460 mm
Anzahl der Bleche	10 Stück	14 Stück	8 Stück
Blechgröße	400 x 600 mm	480 x 680 mm	550 x 330 mm
Leistung Heizung		1800 Watt	
Leistung Gebläse		45 Watt	
Spannung		230 V 50 Hz	



Herstellungsdatum



Elektroprodukt: Darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Spezielle Entsorgung beachten.



Gebrauchsanweisung beachten.



Achtung! (Begleitdokumente beachten)




Anwendungsteil des Typs B
(DIN EN 60601-1)



Hersteller

9. Elektroschaltplan

Stromlaufplan WT 3050-8, WT 3050-14, WT 5070-14

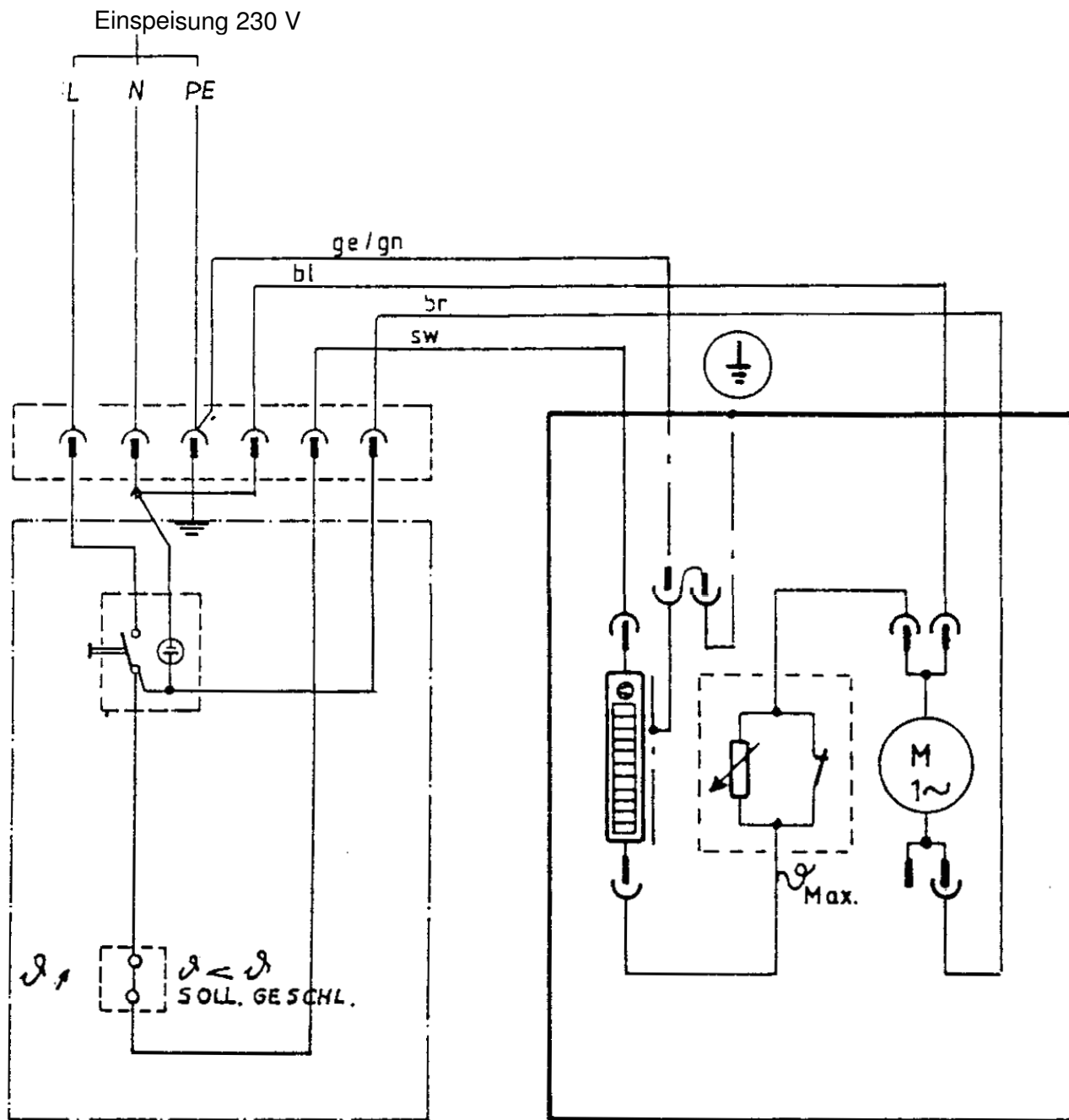

Frontplatte

Montageplatte Heizung

Wärmeschrank für THERM-Packungen Typ WT 3050-14 Teile-Nr. AF6071

Bestehend aus:

Selbsttragende solide Edelstahlblech-Schweißkonstruktion, Oberfläche mustergewalzt. Die Oberseite des Warmhalteschranks ist mit einer integrierten Arbeitsplatte ausgestattet. Alle Aussenseiten sind dickwandig isoliert. Eintürige Ausführung, Türanschlag: Scharnier links serienmäßig (rechts auf Wunsch lieferbar, Teile-Nr. AF6072). 14 Einschübe, mit 10 Aufnahmeblechen aus tiefgezogenem Aluminiumblech 400 x 600 mm längs im Warmhalteschrank auf Edelstahlschienen gelagert. 1 Ein- und Ausschalter mit Kontrolleuchte. 1 Temperaturregler (30 - 80°C). 1 Umluftgebläse 45W, 2000 U/Min. Heizleistung 1800 W. Regelgenauigkeit +/- 1,5°C. Alle Bauteile und Regelorgane sind von vorn servicefreundlich zugänglich.

Fassungsvermögen

Max. 14 THERM-Packungen der Größe 30 x 50 cm oder
max. 7 THERM-Packungen der Größe 50 x 70 cm.
(große Therm-Packungen auf die Hälfte zusammengelegt).

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): ca. 650 x 710 x 820 mm.
Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz.
Anschlusswert: 1845 Watt.
Energieverbrauch: ca. 200 Watt / Std.

Option

Teile-Nr. ZF6020

Zusätzliches Aufnahmeblech (400 x 600 mm).



Wärmeschrank für THERM-Packungen Typ WT 5070-14 Teile-Nr. AF6073

Bestehend aus:

Selbsttragende solide Edelstahlblech-Schweißkonstruktion, Oberfläche mustergewalzt. Die Oberseite des Warmhalteschranks ist mit einer integrierten Arbeitsplatte ausgestattet. Alle Aussenseiten sind dickwandig isoliert. Zweitürige Ausführung. 14 Einschübe, inkl. 10 Aufnahmebleche aus tiefgezogenem Aluminiumblech 460 x 680 mm längs im Warmhalteschrank auf Edelstahlschienen gelagert. 1 Ein- und Ausschalter mit Kontrolleuchte. 1 Temperaturregler (30 - 80°C). 1 Umluftgebläse 45 W, 2000 U/Min. Heizleistung 1800 W. Regelgenauigkeit +/- 1,5°C. Alle Bauteile und Regelorgane sind von vorn servicefreundlich zugänglich.

Fassungsvermögen

Max. 28 THERM-Packungen der Größe 30 x 50 cm oder
max. 14 THERM-Packungen der Größe 50 x 70 cm (gefaltet).

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): ca. 900 x 710 x 820 mm.
Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz.
Anschlusswert: 1845 Watt.
Energieverbrauch: ca. 200 Watt / Std.


Option

Teile-Nr. ZF6023


Zusätzliches Aufnahmeblech (460 x 680 mm).



WT 3050-14

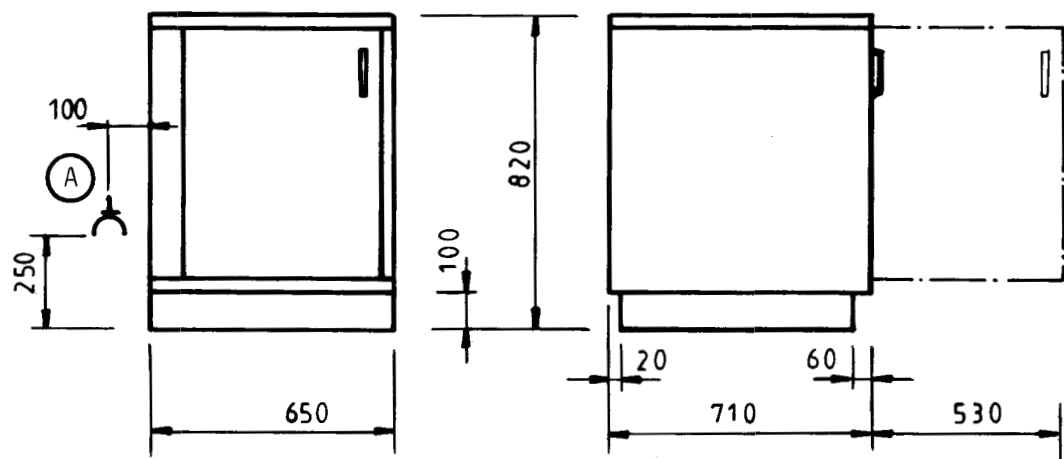

WT 5070-14

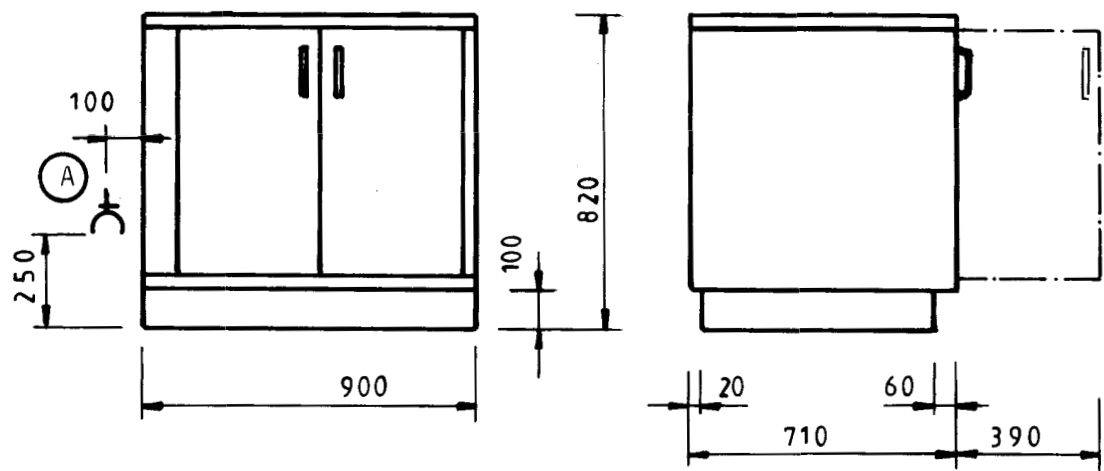



Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de