



Bedienungsanleitung



Ballon Manometer

Art.Nr.: 25322

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Kraftmesser

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Bedienungsanleitung Ballon-Manometer

1. Überprüfen Sie, ob beide Nadeln (Rot und Schwarz) auf Null stehen
2. Lassen Sie den Patient die Birne zusammen drücken
3. Die rote Nadel bleibt am maximalen Messwert stehen
4. Das Resultat, kann anhand der roten Nadel in PSI (= 0.341 kg/cm²) abgelesen werden
5. Stellen Sie die rote Nadel auf den Nullpunkt zurück, bevor Sie eine neue Messung durchführen



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de