




# SCHRÖPFGLAS MIT BALL

## ANLEITUNG

Art.-Nr.  27212 · Kategorie:  Schröpfglas

## Schröpfgläser aus Glas

Basis UDI-DI: 4251054442885T2

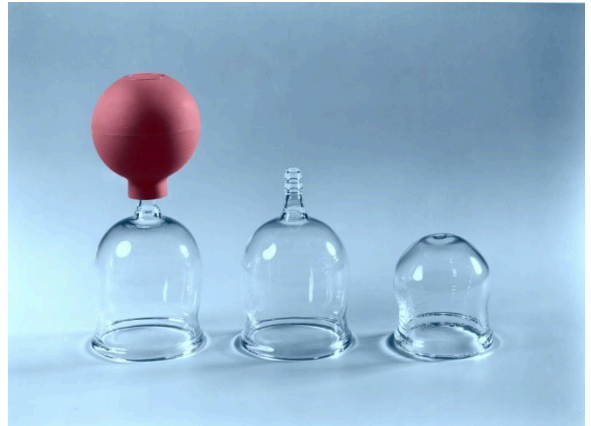

Gebrauchsanweisung



Made in Germany



Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG  
Assistent  
Stettener Str. 22-24  
D-97647 Sondheim/Rhön  
Germany



Schropfglaser werden handgefertigt aus hochwertigen, stabilem Glas an unserem Standort in Sondheim/Rhon. Glas ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, ohne negative Einflusse auf die Umwelt.

Die Glaser werden in verschiedenen Groen und Ausfuhungen (mit Olive und Ball, ohne Olive) und fur die verschiedenen Arten des Schropfens (Schropfmassage, trockenes und blutiges Schropfen) gefertigt

## ubersicht der Schropfglaser

Produkt (Handelsname)	Artikelnr.	Groe ca. $\varnothing$ cm	Ersatzball
Saugglaser nach Bier	42885003	3	91076622010
mit Ball aus PVC	42885004	4	91076622010
	42885005	5	91076622010
	42885006	6	91076622010
Ohne Ball	42886003	3	91076622010
	42886004	4	91076622010
	42886005	5	91076622010
	42886006	6	91076622010
		<b>Groe ca. <math>\varnothing</math> x Hohe cm</b>	
Massage-Schropfglaser	42887010	5 x 11	---
Ohne Olive	42887020	3 x 9	---
Mit Olive ohne Ball	42888010	5 x 11	91288922010
	42888020	3 x 9	91289322010
mit Olive und Ball aus	42889001	3 x 9	91289322010
PVC	42889010	5 x 11	91288922010
		<b>Groe ca. <math>\varnothing</math> cm</b>	
Schropfkopfe, mundgeblasen	42891001	2,5	---
Ohne Olive	42891002	3,5	---
	42891003	4,4	---
	42891004	5,0	---
	42891005	6,5	---
Mit Olive ohne Ball	42892001	2,5	91076622010
	42892002	3,5	91076622010
	42892003	4,4	91289322010
	42892004	5,0	91289322010
	42892005	6,5	91289322010
mit Olive und Ball aus PVC	42893001	2,5	91076622010
	42893002	3,5	91076622010
	42893003	4,4	91289322010
	42893004	5,0	91289322010
	42893005	6,5	91289322010

Tabelle1

**Anwendung:**

Schröpfköpfe werden zum Schröpfen verwendet. Sie können zum blutigen oder trockenen Schröpfen und zur Schröpfkopfmassage verwendet werden.

Zur Behandlung wird ein Unterdruck im Glas benötigt. Der Unterdruck wird bei Gläsern mit Olive durch einen Saugball erzeugt, dazu den mitgelieferten Saugball fest auf der Glasolive montieren. Bei Verlust oder Defekt können Schröpfglas oder Saugball einzeln nachbestellt werden. Die Bestellnummern finden Sie in Tabelle 1.

Bei Gläsern ohne Olive wird der Unterdruck durch Erhitzen des Innenraums (Feuerschröpfen) erzeugt.

**Indikationen:**

Das Schröpfen soll das Wohlbefinden des Patienten verbessern, Verspannungen lösen und Schmerzen lindern. Schröpfen wird zur Therapie verschiedener gesundheitlicher Probleme eingesetzt. Es ist zur Behandlung am Rücken, Armen, Beinen und bei Gelenksproblemen geeignet, weitere Anwendungsgebiete:

- Chronische Schmerzen
- Bluthochdruck
- Menstruationsstörungen
- nicht alkoholische Fettlebererkrankung

Heilpraktiker und Ärzte wenden das Schröpfen im Rahmen einer naturheilkundlichen Behandlung an. (Die Anwendung darf nur durch geschulte Therapeuten erfolgen.)

Für unsachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

**Kontraindikationen:**

Schröpfen darf nicht angewendet werden bei

- Entzündeten und verletzten Hautarealen
- Allergischen Hautveränderungen
- Blutgerinnungsstörungen
- Einnahme von Medikamenten zur Blutverdünnung

**Mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang einer Behandlung mit Schröpfköpfen:**

Wie viele medizinische Behandlungen kann auch das Schröpfen gelegentlich Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Narbenbildung
- Verbrennungen
- Lokale Infektion, Abszesse
- Systemische Infektion
- Kreislaufprobleme (kurzzeitige Bewusstlosigkeit)
- Starke Blutungen
- Schmerz nach Behandlung
- Bildung von entzündlichen Bläschen



**Reinigung:**

Die Schröpfköpfe sind bei Lieferung vorgereinigt aber nicht desinfiziert/sterilisiert.

Vor der jeder Anwendung müssen die Schröpfköpfe desinfiziert (unblutiges Schröpfen) bzw. sterilisiert (blutiges Schröpfen) werden.

Wiederaufbereitungsanleitungen für beiden Verfahren können bei Bedarf angefordert oder von unserer Internetseite <https://www.assistent.eu/service/> heruntergeladen werden.

**Funktionskontrolle:**

Sichtkontrolle vor der Anwendung auf Defekt oder Verschleiß (z. B. Glasbruch). Defekte Instrumente dürfen nicht zur Anwendung kommen.

**Handhabung / Lagerung:**

Schröpfköpfe müssen wegen Bruchgefahr sorgfältig gelagert und behandelt werden. Sie müssen z. B. vor Stößen und Herunterfallen geschützt werden

**Lebensdauer / Entsorgung:**

Schröpfköpfe können für eine unbestimmte Anzahl von Anwendungen verwendet werden. Wird bei Funktionskontrolle ein Defekt festgestellt, dürfen die Gläser wegen Verletzungsgefahr nicht mehr zur Behandlung verwendet werden.

Vorsicht bei der Entsorgung von defekten Gläsern wegen Verletzungsgefahr (z. B. scharfe Kanten), kontaminiertes Material nach bestehenden Vorschriften entsorgen.

**Schwerwiegende Vorfälle:**

Bei schwerwiegenden Vorfällen wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Kontaktdaten ([smp@assistent.eu](mailto:smp@assistent.eu)) oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM ([www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)) oder die in Ihrem Land für Medizinprodukte zuständige Behörde.

**Kontakt:**

Glaswarenfabrik  
Karl Hecht GmbH & Co KG  
Stettener Str. 22-24

D-97647 Sondheim/Rhön  
Germany  
Tel.: +49 9779 8080  
E-Mail: [smp@assistent.eu](mailto:smp@assistent.eu)  
Internet: [www.assistent.eu](http://www.assistent.eu)



Physio & Fitness

==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)

