



## CUPS AUS SILIKON ANLEITUNG

Art.-Nr. ☑ 27241 · Kategorie: ☑ Schröpfglas

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

## **ALLGEMEINES**

Der Cup aus Silikon hat seine Einsatzgebiete sowohl im Sport, als auch in den Bereichen Wellness und Beauty.

Der Cup erzeugt beim Aufsetzen auf der Haut einen Unterdruck. Bei einer regelmäßigen Anwendung kann verklebtes Faszienewebe dadurch gelöst und gelockert werden.

Darüber hinaus können die Cups auch zur Massage und zum Einarbeiten von Pflegeprodukten in die Haut eingesetzt werden. Insbesondere nach dem Sport kann eine sanfte Massage mit den Cups die Muskulatur entspannen und die Regeneration positiv beeinflussen.

## **ANWENDUNGSHINWEISE**

Der Cup wird zur Anwendung auf die Haut aufgesetzt und zusammengedrückt. Durch die elastische Saugfläche des Cups kann dieser auch an unebenen Hautoberflächen angesetzt werden.

Hauptanwendungsbereiche sind der Nacken, Schultern, Rücken, Gesäß, Ellbogen und Knie. Um einen optimalen Halt zu erreichen, reiben Sie die Haut vorher mit etwas Massageöl oder Massagelotion ein.

Die Saugkraft des Cups kann durch das Zusammendrücken individuell angepasst werden.

# PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Cups nach jeder Anwendung gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife und desinfizieren Sie die Cups ggf. mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Cup aus Silikon			Cup-Set aus Silikon
Art.-Nr.	27241	27243	27245	27247
Durchmesser	3,8 x 8 cm	5 x 5 cm	7 x 8 cm	3,8 x 8 cm, 5 x 5 cm, 7 x 8 cm
Material	Silikon			
Ursprungsland	Made in China			



27241



27243



27245



==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)