



## Bedienungsanleitung



### DESTIX Desinfektionstücher XXL in Spenderbox

Art.Nr.: 28587

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Hautdesinfektion

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Produktinformationsblatt:  
**Destix Med**  
**Desinfektionstücher**  
**Flächendesinfektionsmittel**

**Wirksame Bestandteile:** 100 g enthalten:  
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,25 g Alkylethylbenzyltrimethylammoniumchlorid  
0,25 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid  
20 g Ethylalkohol  
10 g 1-Propanol

**Registrierung:** Die Desinfektionsprodukte sind bei der BAUA (Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) registriert.

**Wirkmechanismus:** Auflösen der Zellmembran, dadurch Zerstörung der Mikroorganismen.

**Wirksamkeiten:**

| <b>Getestete Mikroorganismen:</b> | <b>Einwirkzeit:</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Bakterien:</b>                 |                     |
| Staphylococcus aureus             | 1 Minute            |
| Escherichia coli                  | 1 Minute            |
| Pseudomonas aeruginosa            | 1 Minute            |
| Proteus mirabilis                 | 1 Minute            |
| <b>Pilze:</b>                     |                     |
| Candida albicans                  | 1 Minute            |
| <b>Viren:</b>                     |                     |
| HBV                               | 1 Minute            |
| HCV                               | 1 Minute            |
| HIV                               | 1 Minute            |

**Anwendung:** Destix Med ist ein flüssiges Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel für Oberflächen in Krankenhaus, Praxis, Haushalt usw. Je nach Oberflächenstruktur 20–50ml/qm verwenden. Für eine desinfizierende Wirkung muss Destix Med unverdünnt, mindestens 1 Minute lang auf die Oberfläche einwirken. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Abtrocknen wiederbenutzt werden.

**Eigenschaften:** Destix Med besitzt zusätzlich, durch den ausgewogenen Alkoholanteil eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt mühelos Talg- & Fettablagerungen, Staubpartikel, Nikotinrückstände usw.

**Umweltverhalten:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Lagerbedingungen:** Reiniger sollte in gut verschlossenen Gebinden in kühlen Räumen gelagert werden (siehe auch Sicherheitsdatenblatt). Nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr verwenden.

**Kennzeichnung:** Das Produkt ist gemäß Gefahrstoffverordnung eingestuft und gekennzeichnet:

**Allgemeiner Hinweis:** **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Gebrauchshinweise und Produktinformationen lesen.**



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de