



Markus Schmid
 Tierstein 2
 78661 Dietingen
 Fon 0741-17475975


info@wenea.de
 www.wenea.de

Gebrauchsanweisung Kirschkerne


Wenea Kirschkerne sind ein mehrfach gereinigtes Qualitätsprodukt.

Wenea Kirschkerne werden zum Sensibilitäts- und Wahrnehmungstraining, zur taktilen Stimulation, zur Mobilisierung und zum Kraftaufbau der Hand- und Fingergelenke sowie der Unterarme verwendet. Im Kirschkernebad sind physiologische Bewegungen gegen Widerstand möglich.


Vorbereitung

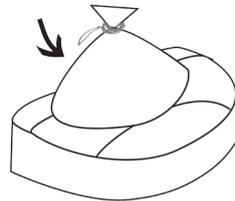

Anwendung
 Ergonomiewanne

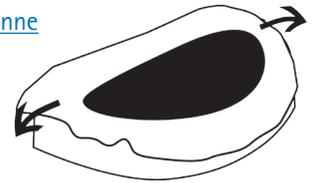

Bei der Verwendung einer Ergonomiewanne wird die Wanneneinlage in dieser ausgebreitet, dabei den Kordelstopper ganz aufziehen. Nach der Anwendung muss der Kordelstopper ganz zugezogen und die Kordel um die Öffnung gewickelt werden.

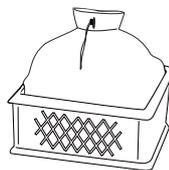

Anwendung FlexiSack



Zur Anwendung wird der Kordelstopper aufgezogen, dass eine Hand locker eintauchen kann. Nach der Anwendung wird der Kordelstopper wieder ganz zugezogen.

Bei der Verwendung des FlexiSacks ohne Lagerbox, muss dieser mit einer Hand fixiert werden.

Stand Dezember 2024

Anwendung

Während der Anwendung werden die Hände in die Kirschkerne eingetaucht und aktiv oder passiv bewegt und massiert. Eine Anwendung dauert zwischen 3 und 10 Minuten und kann mehrmals täglich wiederholt werden.

Vor der Anwendung alle Körperteile, die mit Kirschkernen in Berührung kommen, waschen und desinfizieren. Nach der Anwendung die betreffenden Körperteile säubern, besonders Fingerzwischenräume und Fingernägel und erneut desinfizieren.

Die Anwendung erfolgt bei Zimmertemperatur.

Lagerung

Die Kirschkerne kühl, trocken sowie vor Verschmutzungen und Ungeziefer geschützt lagern, jedoch nicht luftdicht.

max. Lagertemperatur 25°C / max. Luftfeuchtigkeit 70%



trocken
 aufbewahren



Gebrauchsanweisung
 beachten



max. 70%
 Luftfeuchtigkeit

Was ist zu beachten

An Hautverletzungen, Wunden, Schürfwunden oder Allergien nicht einsetzen. Bei Infektionserkrankungen nicht verwenden.

Bei der Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen, (z.B. in Pflegeheimen) und bei der Anwendung an den Füßen, dürfen Kirschkerne nur von einer Person verwendet werden.

Nur zur äußeren Anwendung geeignet. Bei Kindern nur unter Aufsicht anwenden. Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet.

Vorsicht! Auf herabgefallenen Kirschkernen besteht erhebliche Rutschgefahr. Herabgefallene Kerne sind unverzüglich zu beseitigen ohne darauf zu treten.

Die Kirschkerne können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Nach der Desinfektion mit klarem Wasser mehrmals spülen. Daraufhin zum Trocknen auslegen und auf vollständige Trocknung achten. Sollten die Kirschkerne verschmutzen, schimmeln oder keimen, dürfen sie nicht mehr verwendet werden.

Die Kirschkerne können in der Bioabfalltonne entsorgt werden.